



Panneau de contrôle

Réglage de l'irrigation

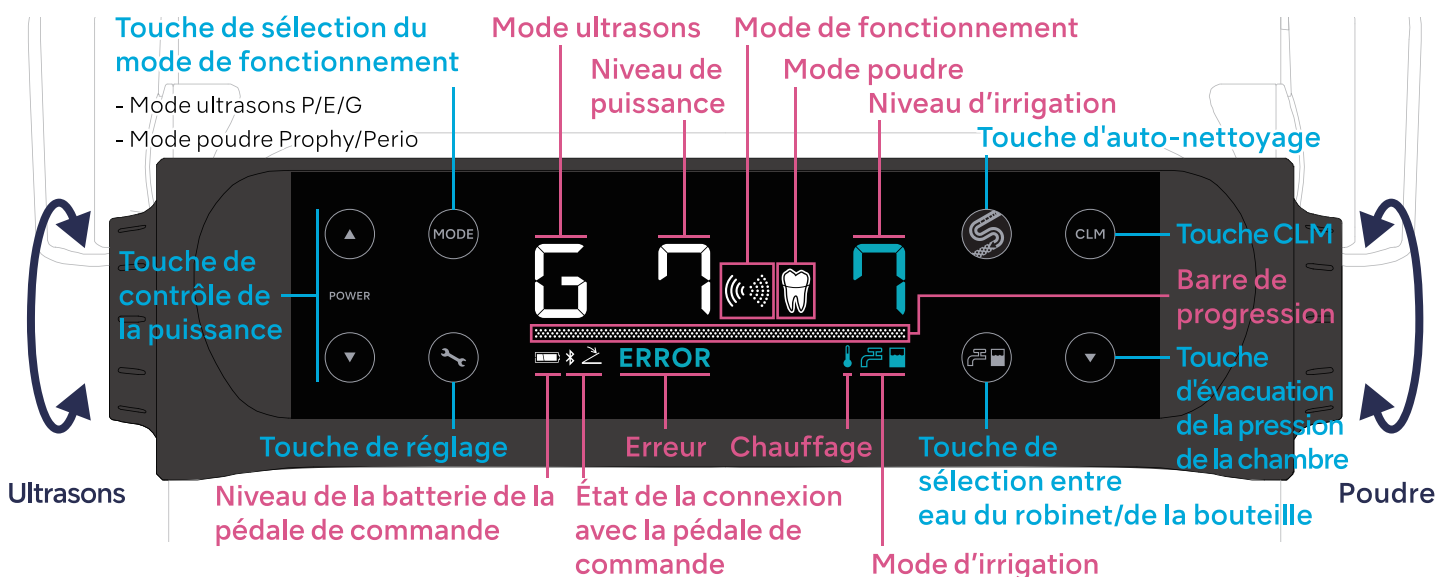


Pédale de commande

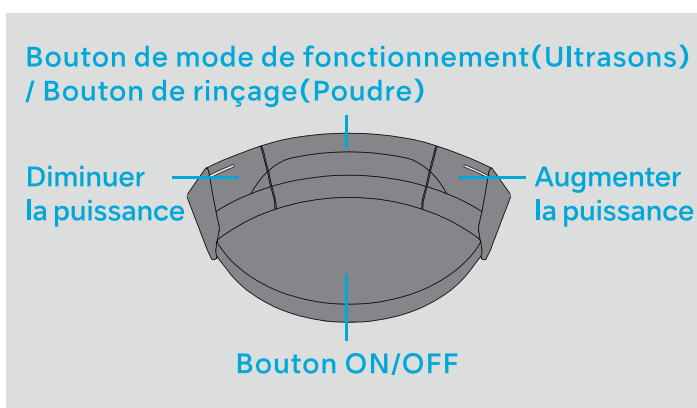

Utilisation du mode ultrasons


- 1 Prenez la pièce à main à ultrasons.
- 2 Sélectionnez le mode ultrasons (P/E/G).
- 3 Réglez le niveau de puissance.
- 4 Sélectionnez la méthode d'irrigation.
- 5 Réglez le niveau d'irrigation.
- 6 Appuyez sur le bouton ON/OFF.

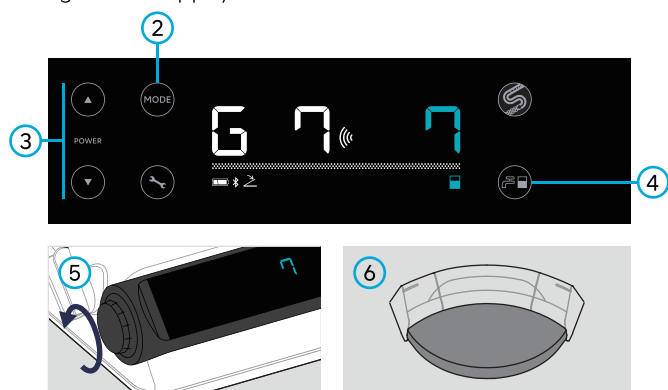

Utilisation du mode poudre

Mode	Chambre	Pièce à main	Embout	Utilisation	Poudre
		NSK Prophy/Perio		3-5 mm 10-60°	
		NSK Prophy/Perio		3-10 mm 30-90°	
		NSK Prophy/Perio		3-10 mm 30-90°	
		NSK Prophy/Perio		3-10 mm 30-90°	

- 1 Prenez la pièce à main à poudre.
- 2 Sélectionnez le mode poudre (Prophy / Perio).
- 3 Réglez le niveau de puissance.
- 4 Réglez le niveau d'irrigation.
- 5 Appuyez sur le bouton ON/OFF.

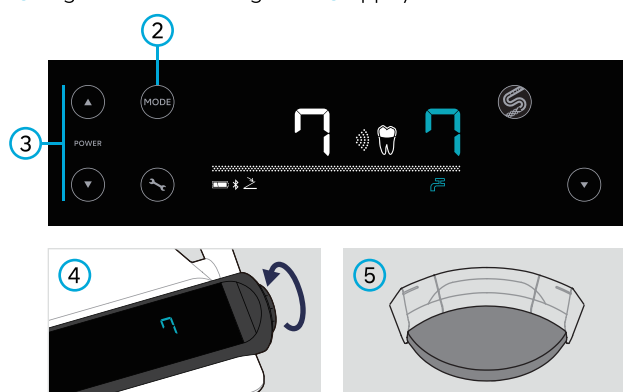


Auto-nettoyage

	Fréquence d'exécution des modes d'auto-nettoyage	Utilisation courante du Varios Combi Pro2		
		Ultrasons et Poudre	Poudre uniquement	Ultrasons uniquement
Mode d'auto-nettoyage à activer	Après chaque traitement	W(poudre)	W(poudre)	—
	Une fois par jour (Après dernier traitement)	D	P	W (ultrasons)


W (Ultrasons) : Élimination de l'eau
W (Poudre) : Élimination de l'eau et de la poudre de purge
P : Élimination de l'eau du tuyau de la pièce à main
Élimination des poudres du circuit des poudres
Libération de la pression de la chambre
D : Élimination de l'eau du cordon/tuyau de la pièce à main
Élimination des poudres du circuit des poudres
Libération de la pression de la chambre



Réglez le niveau d'irrigation sur 10. Touchez pendant trois secondes, jusqu'à ce que « AC » s'affiche.

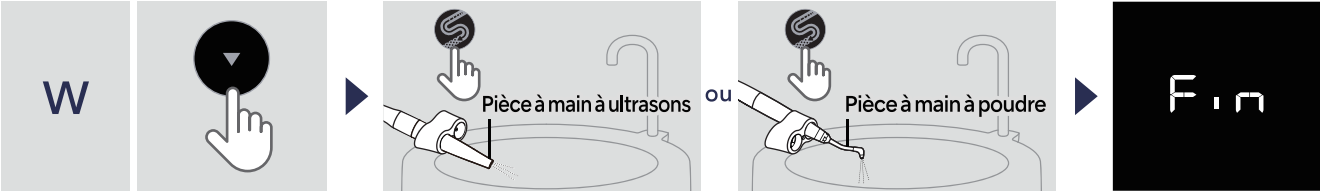


Sélectionnez « W ». Insérez la pièce à main avec le cordon ou le tuyau dans le support CLM. Touchez . Après l'affichage de « Fin », touchez .

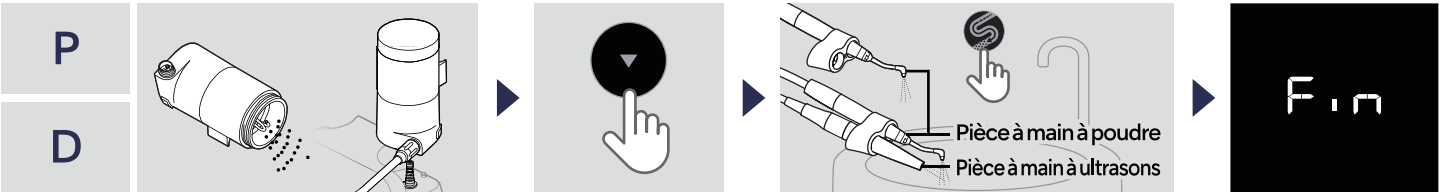


Jetez la poudre et fixez la chambre. Sélectionnez « D » ou « P ». Insérez les pièces à main avec le cordon /tuyau dans le support CLM. Touchez . Après l'affichage de « Fin », touchez .


Décontamination/prévention de la formation de biofilms(Mode CLM)

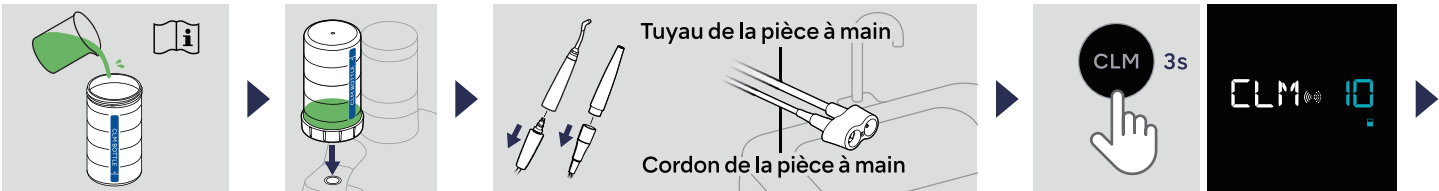

Remplissez le flacon CLM de b.clean ou Bilpron (ALPRO) (non dilué). Insérez la bouteille CLM. Retirez le cordon/tuyau de chaque pièce à main et insérez-le dans le support CLM. Touchez pendant 3 secondes, jusqu'à ce que l'écran ci-dessus s'affiche.

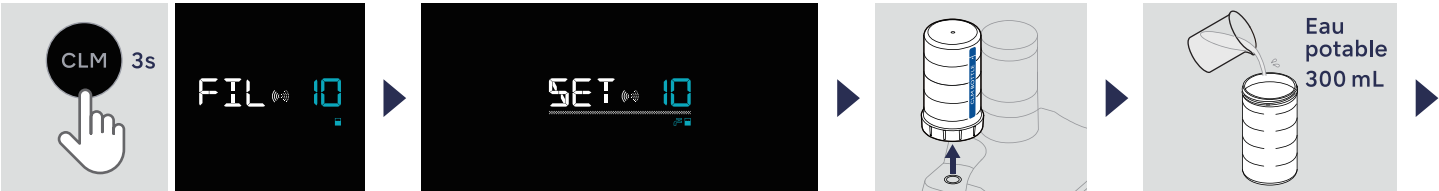

Touchez pendant trois secondes, jusqu'à ce que le mode CLM démarre. Après l'affichage de l'écran ci-dessus, éteignez l'appareil et attendez 12 heures ou plus. Mettez l'appareil sous tension. Retirez la bouteille CLM. Remplissez la bouteille d'irrigation désinfecté avec de l'eau potable.

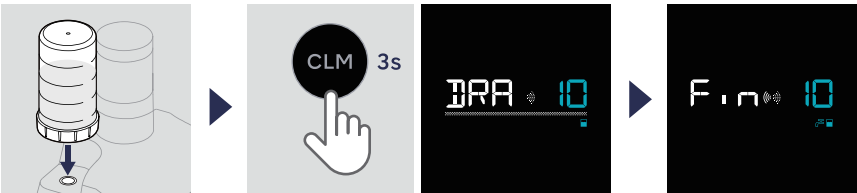

Insérez la bouteille d'irrigation. Touchez pendant trois secondes, jusqu'à ce que la vidange commence. Le mode CLM est terminé lorsque l'écran ci-dessus s'affiche. Touchez pour revenir à l'affichage normal.